


Перед початком тесту

- Зберігайте цей набір для тесту при кімнатній температурі або при температурі від 2 °C до 30 °C (не зберігайте в морозильній камері та не піддавайте впливу прямих сонячних променів; не залишайте в автомобілі).
- Знайдіть чисту рівну поверхню (без їжі, напоїв та безладу), яку легко очистити у разі розливу.
- Не їжте, не пийте, не куріть тютюнові або електронні сигарети, не надягайте контактні лінзи, не наносьте макіяж і не торкайтеся обличчя під час тесту.
- Цей тест призначений для самоперевірки.
- Не використовуйте цей тест, якщо у вас кровотеча з носа.

Ресурси

Для отримання додаткової інформації про експрес-тестування, перекладені версії цього посібника та відео про те, як проводити тест, скористайтеся QR-кодом нижче або відвідайте сайт: bccdc.ca/covid19rapidtesting

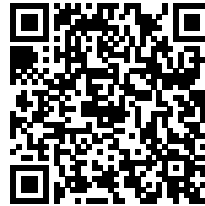

- 繁體中文
- 简体中文
- ਪੰਜਾਬੀ
- Việt Ngữ
- español
- ትግርኛ
- français
- 한국어
- عربي
- فارسی



Розуміння точності тесту

Експрес-тести на антигени виявляють антигени (білки) вірусу, що викликає COVID-19. Може пройти від **3 до 7 днів** після інфікування, перш ніж вірус буде виявлено тестом. Якщо людина з COVID-19 здає аналіз занадто рано після інфікування, результат тесту може бути негативним; це називається хибно-негативний результат.

Експрес-скринінг на антигени дає результат на конкретний момент часу. Негативний результат не гарантує, що людина не є інфікованою. Якщо ви нещодавно зазнали впливу COVID-19, ви все одно можете отримати позитивний результат пізніше, коли у вашому організмі буде достатньо антигенів для виявлення тестом.

Інструкція

- 1** Висякайте ніс і викиньте серветку. Помийте руки з милом.




- 2** Зберіть обладнання для тестування:
- Набір для тесту Artron:
 - 1x тестовий пристрій
 - 1x стерильна ватна паличка
 - 1x пробірка (герметично закрита з рідиною)
 - 1x ковпачок для пробірки
 - 1x штатив для пробірок (якщо є)




- таймер
- відро для сміття
- маленька склянка або чашка (за бажанням)

Набір для тесту Artron включає:


Ковпачок Пробірка

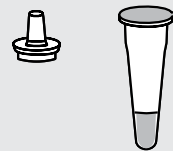


Тестовий пристрій

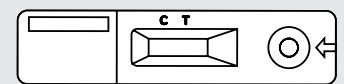

Стерильна ватна паличка

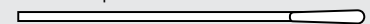

Штатив для пробірок

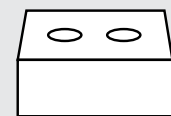

Таймер




Відро для сміття




Склянка або чашка (за бажанням)

- 3** Зніміть фольгу з пробірки.

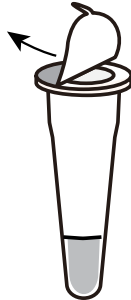


- 4** Помістіть заповнену пробірку в зібраний штатив для пробірок або чисту склянку чи чашку.

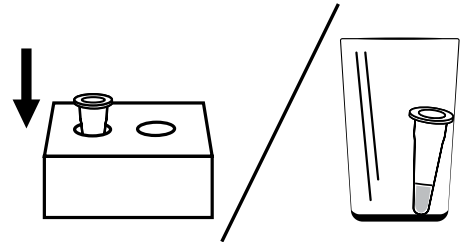


- 5** Візьміть зразок із носа:

- 1 Вийміть ватну паличку з упаковки. Торкайтеся тільки пластикового кінця палички.
- 2 Нахиліть голову назад.
- 3 Вставте ватний кінець палички прямо назад (не вгору) в одну ніздрю на 1,5 см (3/4 дюйма).
- 4 Прикладіть ватну паличку до внутрішньої сторони носа, щоб взяти пробу назальної рідини. Акуратно та повільно поверніть 5 разів.
- 5 Повторіть для іншої ніздрі, використовуючи ту саму ватну паличку.

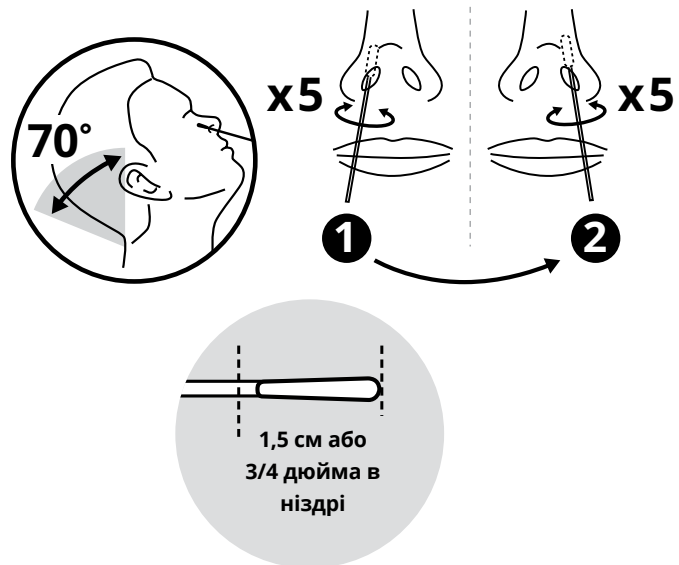


Не використовуйте паличку для тесту, якщо на ній є кров. Висморкайте ніс і візьміть нову ватну паличку. Якщо у вас була носова кровотеча, зачекайте 24 години перед тестуванням.


- 6** Акуратно вставте ватний кінець палички в пробірку:

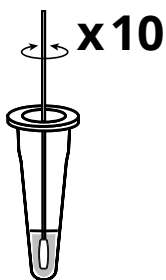

- 1** **Обережно і повільно** покрутіть кінчик ватної палички в буферній рідині 10 разів.

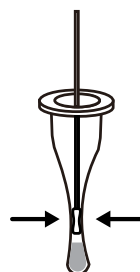

- 2** Вийміть ватну паличку, затискаючи боки пробірки, щоб выдавити всю рідину з ватної палички. Викиньте ватну паличку у відро для сміття.

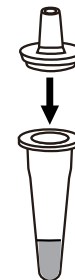

- 3** Щільно притисніть кришку до пробірки, щоб закрити її.

COVID-19


Інструкція з експрес-тесту на антигени в домашніх умовах

Artron




BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

- 7** Відкрийте тестовий пристрій і покладіть його на плоску поверхню (наприклад, на стіл).

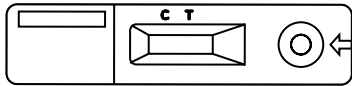


- 8** Тримайте пробірку безпосередньо над тестовим пристроєм, ковпачок спрямований прямо вниз. Повільно видавіть 4 краплі на коло на тестовому пристрої.


Не дозволяйте пробірці торкатися кола.

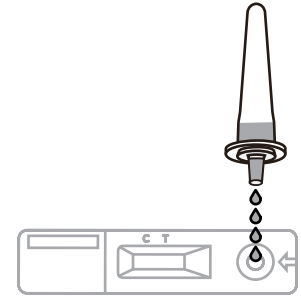


- 9** Встановіть таймер на 30 хвилин та перевірте результат. Не переміщуйте тестовий пристрій протягом цього часу. Показання через 30 хвилин можуть бути неточними.

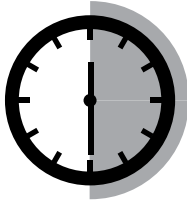

- 10** Викиньте все тестове обладнання у відро для сміття.

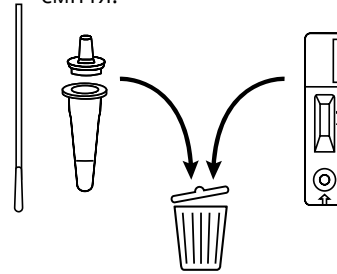

- 11** Помийте руки.

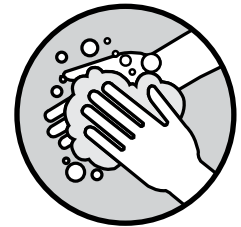


Як читати результати

Не має значення, яка лінія з'явилася першою або наскільки тьмючими виглядають лінії. Лінії будуть рожевими або фіолетовими. Контролюйте тестовий пристрій після встановлення таймера. Очікування результатів тесту може тривати до 30 хвилин. Позитивні результати можуть з'явитися раніше.

Зверніться за медичною допомогою у разі потреби незалежно від того, позитивний у вас тест чи негативний.

Негативний результат


З'являється лише контрольна лінія (C).

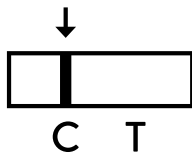

Якщо ваш результат негативний, це означає, що COVID-19 не було виявлено. Ціком можливо, що у вас COVID-19.

Позитивний результат

З'являються контрольна лінія (C) і тестова лінія (T).

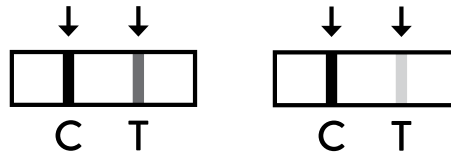


Позитивний результат означає, що у вас, ймовірно, COVID-19, і ви можете передати його іншим.

Дізнайтеся, чи можете ви отримати позитивний результат від лікування, на сайті gov.bc.ca/covidtreatments або зателефонуйте за номером **1-888-268-4319**

Недійсний результат

Контрольної лінії (C) НЕМАЄ

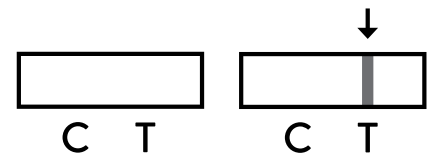

Якщо ваш тест недійсний, викиньте всі зразки з першого тесту. Вимийте руки і повторіть процес, використовуючи другий набір для тесту. Дотримуйтесь інструкцій з проведення тесту ще раз.